



Tjek for tegn på pludseligt hjertestop:  ikke reagerer  
 ikke trækker vejret normalt


**1 TRÆK**

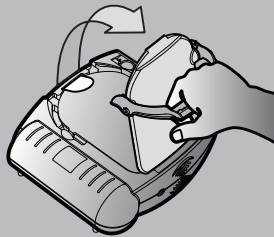

**2 PLACER**

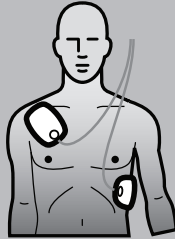



**3 TRYK**

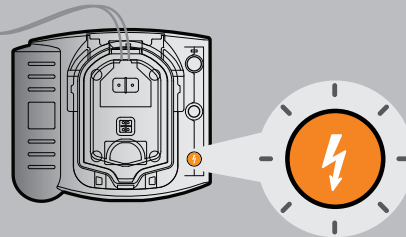

KORT OVERSIGT


## DETALJEREDE INSTRUKTIONER

For at starte: Træk i håndtaget.  
Fjern beskyttelsestildækningen.

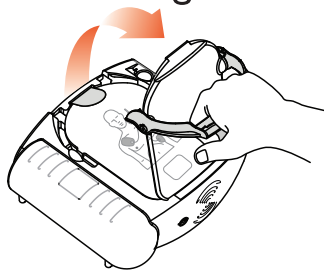
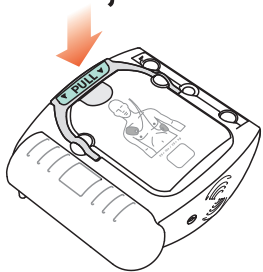


1

Fjern alle klæder fra patientens bryst.  
Rengør og tør huden, hvis nødvendigt.


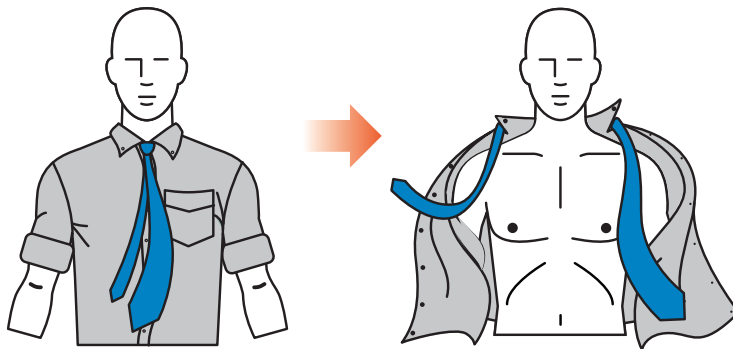


Træk filmlaget af og udtag elektroderne.

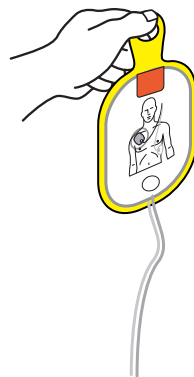
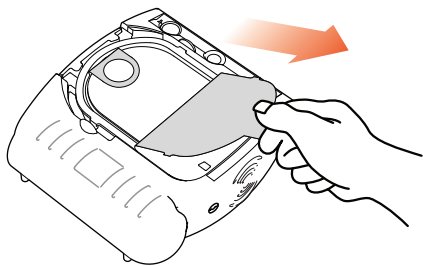


3

Træk hver elektrode af det gule plastindlæg.

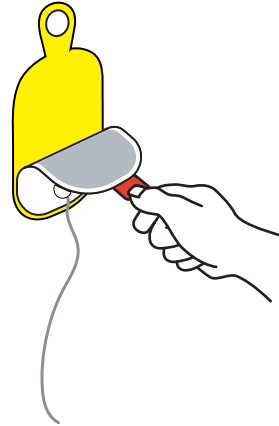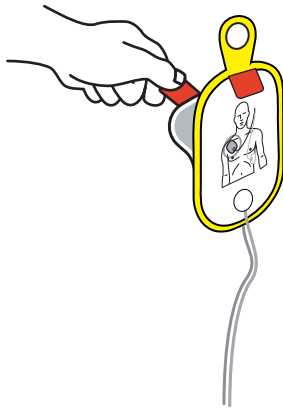

Placer elektroder nøjagtigt som vist på billedet.

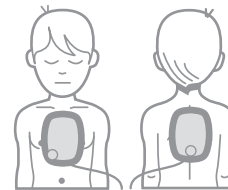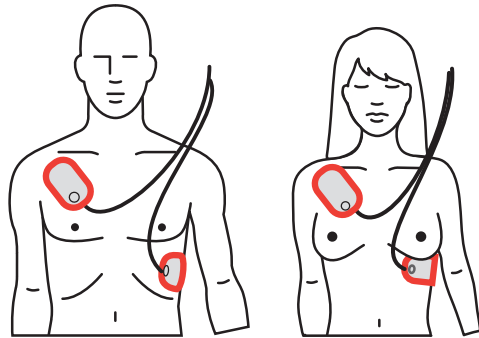


(0-8 ÅR) < 25 kg

## Analyserer ... Rør ikke patienten!


Vent, indtil



standser med at blinke

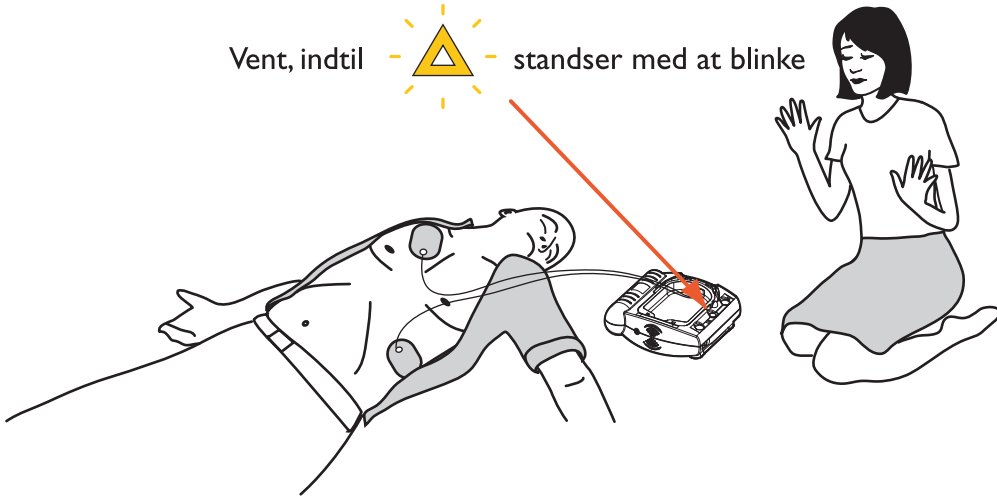


For at give stød: Tryk på den blinkende **ORANGE** stødknap. Rør ikke patienten!

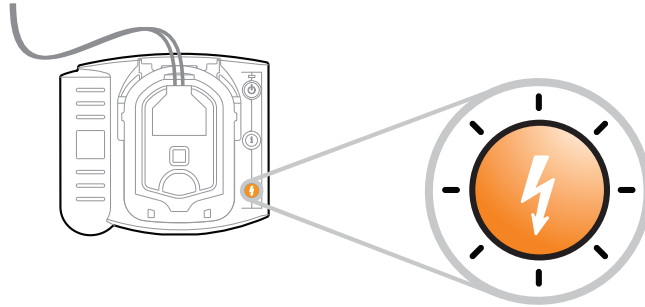




For at få hjælp med CPR: Tryk på den blinkende **BLÅ** knap.

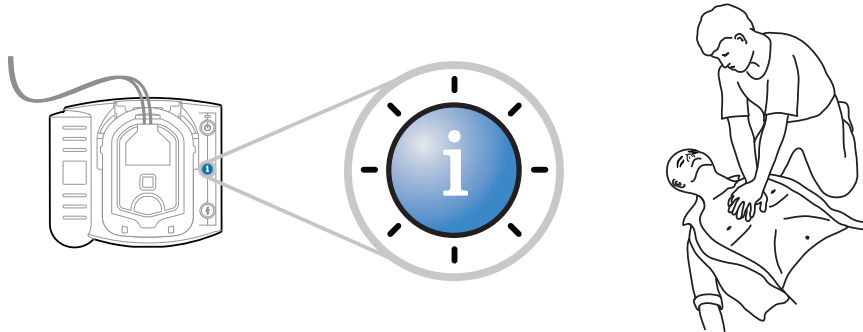


30 kompressioner • Klem næse, vip hoved • 2 fulde åndedræt

8

For at TÆND: Tryk på den **GRØNNE** tænd/sluk-knap.

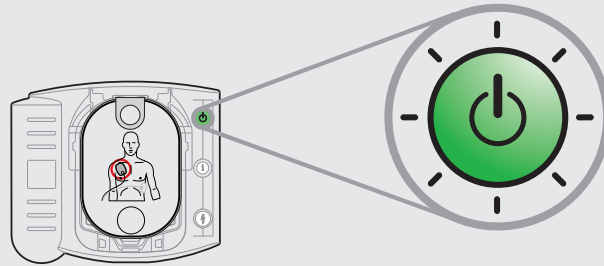

Hvis det er nødvendigt at udskifte kassette: Skub lås.

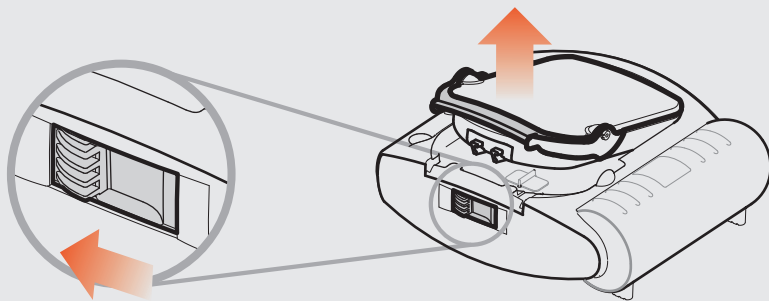

Trykt i USA

Philips Medical Systems  
Seattle, WA 98121

Copyright © 2008  
Philips Electronics North American Corp

011841 REV VII

M 5 0 6 6 - 9 7 8 1 5



0 1 1 8 4 1 - 0 0 0 6

**PHILIPS**